

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. ("ALASA"), se dirige a usted a fin de informarle que la compañía RESMED emitió recientemente un aviso de seguridad a nivel mundial, en el cual se alerta sobre la **actualización de las Contraindicaciones y Advertencias en las Guías del usuario para instruir a los pacientes sobre el uso seguro de las mascarillas con imanes de ResMed** (modelos: AirFit F20, AirFit F20 for Her AirTouch F20/AirTouch F20 for Her AirFit F30 AirFit F30i; AirFit N10, AirFit N10 for Her AirFit N20, AirFit N20 for Her AirTouch N20, AirTouch N20 for Her; AirFit F20 NV), las cuales contienen imanes que podrían interferir con algunos implantes o determinados dispositivos médicos (el "Aviso de Seguridad") como la que Ud. ha adquirido de ALASA.

En este sentido, le compartimos el enlace a la "**Carta a Pacientes del Fabricante**" que **debe ser leída con atención** por los usuarios de las mencionadas máscaras y/o cuidadores: La información está disponible en la siguiente página web: <https://www.resmed.lat/mask-magnet-clip-guidelines>

Como podrá leer en los mencionados enlaces, la recomendación de RESMED a los **usuarios con (o cercanos a personas con) Implantes médicos activos que interactúan con imanes y /o Implantes/objetos metálicos que contienen material ferromagnético** que esté identificado dentro de las Contraindicaciones de la "**Carta a Pacientes del Fabricante**" es:

- *Reemplace su mascarilla que contiene imanes por una mascarilla alternativa sin imanes de manera oportuna. Comuníquese con su proveedor de mascarillas para conocer las opciones de mascarillas alternativas.*
- *Si no hay una mascarilla alternativa disponible, consulte a su médico para conocer los próximos pasos apropiados con respecto a su terapia.*
- *Elimine la mascarilla con imanes después de que reciba una mascarilla alternativa. Tenga en cuenta que no todos los modelos o variantes de dispositivos médicos que se mencionan en las contraindicaciones se ven afectados por campos magnéticos externos. Si no está seguro de si un dispositivo o implante médico está incluido en las Contraindicaciones, o requiere información adicional sobre los posibles efectos adversos de los campos magnéticos en su equipo específico, comuníquese con su médico*

Todos los demás pacientes que utilizan una mascarilla ResMed con imanes si **NO** tienen contraindicaciones para usar una mascarilla de ResMed con imanes, pueden continuar usándola, asegurándose de seguir todas las instrucciones del usuario, incluidas las actualizaciones descritas en la "**Carta a Pacientes del Fabricante**".

- Es importante destacar que **las mascarillas de ResMed con imanes deben mantenerse al menos a 6 pulgadas (150 mm) de distancia de implantes o dispositivos médicos que puedan verse afectados negativamente por interferencias magnéticas**, como se describe en la Advertencia actualizada. Para obtener más información relacionada a estos cambios, visite [www.resmed.com/magnetupdate](http://www.resmed.com/magnetupdate).

AIR LIQUIDE ARGENTINA tiene como objetivo brindar un servicio seguro y de calidad a nuestros pacientes. Es por ello que estamos a su disposición ante cualquier inquietud en la línea **0810-122-1022**, opción 0 o bien en nuestro correo electrónico: [avisodeseguridad@airliquide.com](mailto:avisodeseguridad@airliquide.com).